



igloo[®]
 Attelle de Cryothérapie Compressive

- Cryothérapie
- Compressive
- À domicile



Breveté

Thérapie du froid avec compression

- Effet antalgique rapide
- Réduit œdème et inflammation
- Facilite la rééducation
- Décontractant musculaire

Facile d'utilisation

- Fixation par bande auto-agrippante
- Compression par pompe à main

Indications

- Traumatismes sportifs
- Rhumatismes inflammatoires
- Rééducation
- Utilisation postopératoire

Attelle Hanche

Dispositif médical à usage individuel

**IMPLANTS
SERVICE
ORTHOPÉDIE**

igloo[®]
 Attelle de Cryothérapie Compressive

N° de lot

EAN 13.



3401060028817

**IMPLANTS
SERVICE
ORTHOPÉDIE**

1 rue Jules Guesde
 91130 RIS-ORANGIS
 Tél. : + 33 (0)1 69 02 19 20
www.orthopedie-iso.fr

Attelle Hanche

NOTICE D'UTILISATION

DESCRIPTION

Les attelles Igloo® incluent un pack de gel qui s'applique sur les zones douloureuses. C'est une innovation dont le principe thérapeutique est basé sur l'action conjuguée de la cryothérapie, de la compression et de la contention. Cette technique soulage rapidement la douleur en limitant l'œdème, l'inflammation, et en évitant les hématomes, ce qui facilite ensuite la rééducation et la récupération.

L'utilisation est simple, efficace et confortable. Pour éviter tout risque de brûlure, il est indispensable d'interposer un tissu entre le pack de gel et la peau. Nos attelles sont ajustables, grâce à un système de fermeture par bande auto-agrippante. Une pompe permet de régler la pression de l'air. Il est indispensable, à chaque changement de pack de gel, de dégonfler l'attelle et de la repositionner avec la bande auto-agrippante avant de la gonfler de nouveau.



AVERTISSEMENT

CE DISPOSITIF DOIT ÊTRE UTILISÉ SUIVANT LES INSTRUCTIONS D'UN PRATICIEN DÛMENT HABILITÉ (CHIRURGIEN, MÉDECIN, KINÉSITHÉRAPEUTE, PHARMACIEN).

Risque de brûlures sur peau hypersensible

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Ne doit pas être mise en contact direct avec la peau
- Ne pas laisser à la portée des enfants
- Ne pas percer la tubulure et le pack de gel
- Ne pas chauffer le pack de gel
- Ne pas ingérer le gel

Les attelles IGL00® ne requièrent pas de conditions particulières de stockage, de manutention et d'élimination. En cas de pack gel percé, videz le contenu du pack dans les toilettes.

INDICATIONS

- Traumatologie (entorses, déchirures, contracture musculaire, blessures sportives...)
- Rhumatismes inflammatoires
- Rééducation
- Utilisation postopératoire

CONTRE-INDICATIONS

(avis médical obligatoire avant utilisation)

- Troubles de la sensibilité cutanée
- Insensibilité au froid
- Allergie au froid
- Syndrome de Raynaud
- Cryoglobulinémie
- Artérite
- Polyarthrite
- Diabète.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

- Après avoir été placé dans le sac de congélation, le pack de gel doit être mis au congélateur environ deux heures avant l'utilisation*. À la sortie du congélateur, le pack doit être souple (sinon, laisser le pack à température ambiante le temps qu'il s'assouplisse).
- Disposer le pack de gel dans l'attelle, puis mettre en place l'attelle en suivant le principe de mise en place (voir ci-dessous). En aucun cas le pack de gel ne doit être en contact direct avec la peau. Interposer un jersey (fourni avec certains modèles) entre le pack de gel et la peau, puis positionner l'attelle par dessus celui-ci.
- L'application de l'attelle avec le pack de gel est préconisée durant 20 à 30 mn maximum (temps d'efficacité de la thérapie par le froid), et trois à quatre fois par jour. L'utilisation en continu de la cryothérapie est déconseillée.
- Utilisation de la pompe à main :
 - Le robinet situé sur l'attelle doit être en position ON.
 - La compression ne doit pas être excessive et doit rester confortable.
 - Si une compression trop importante ou une perte de sensibilité (fourmillement) est ressentie, dégonfler légèrement l'attelle à l'aide du petit bouton situé sur la pompe, le robinet en position ON.
 - Une fois la compression satisfaisante obtenue, verrouiller le robinet sur la position OFF et débrancher la pompe de gonflage.
- L'attelle peut être lavée en respectant les conseils ci-dessous.
- En cas de contact direct du gel avec la peau, rincez abondamment avec de l'eau.

CONSEILS DE LAVAGE

-  Laver à la main à l'eau tiède avec un savon doux. Ne pas utiliser d'eau de Javel, ou de détergent.
-  Ne pas laver ni sécher en machine.
-  Faire sécher suspendu. Ne pas sécher près d'une source de chaleur
-  Ne pas repasser
-  Conforme aux exigences de l'Union Européenne
-  Fabricant.

*Selon votre congélateur

Composition du Set



sac de congélation



pack de gel



housses de protection pour pack de gel



attelle avec pompe et tubulure



auto-agrippants



C




sangles hanche et cuisse


Principe de mise en place




1 Par mesure d'hygiène, glisser le pack de gel bleu dans le sac de congélation. Puis, le placer 2 heures au congélateur avant utilisation sans l'attelle, ni la pompe, ni la tubulure.

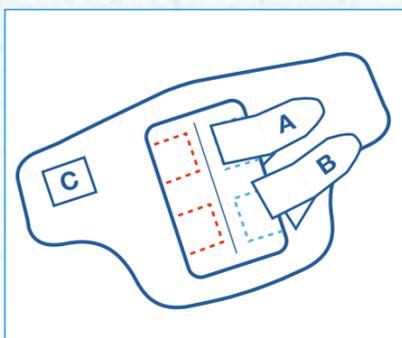


2 Pincer les 2 petites bandes auto-agrippantes (A et B) au volet d'attache sur la couture rouge pour la hanche droite, ou sur la couture bleue pour la hanche gauche. Fixer ensuite le rectangle auto-agrippant double face C sur le côté opposé.

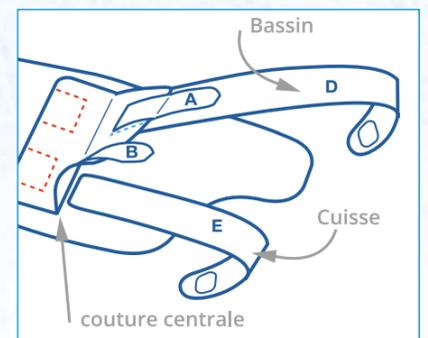


3 Choisir 2 bandes adaptées à votre gabarit parmi les 4 proposées. Une pour le bassin (D) une pour la cuisse (E). Positionner la bande E au niveau de la couture centrale sous le volet d'attache. Fixer ensuite la bande B sur E. Fixer de la même façon la bande A sur D.

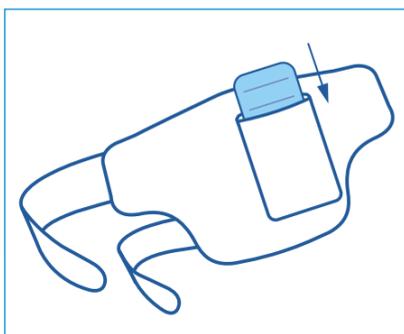

4 IMPORTANT : Afin d'éviter tout risque de brûlure, insérer le pack de gel dans sa housse de protection. Fixer le tout sur la face intérieure de l'attelle de façon à placer le pack de gel sur la zone opérée.

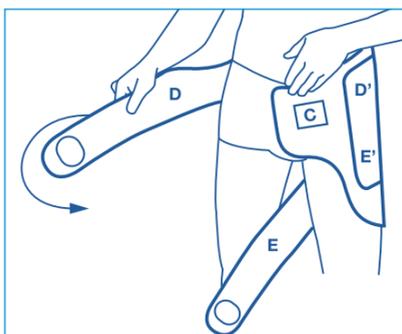

5 Positionner l'attelle autour de votre taille. D'une main maintenir l'attelle au niveau du bassin, de l'autre main, fixer la bande D en C puis en D'. Et la bande E en E'.

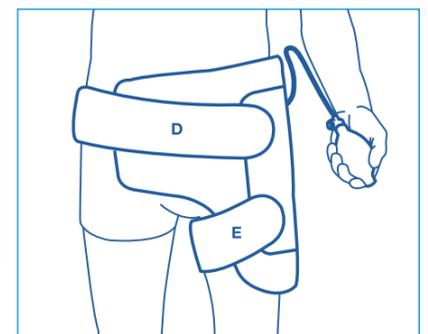

6 Visser la pompe, positionner le bouton sur ON et exercer 35 à 40 pressions. Stopper quand la pression est satisfaisante et confortable. Fermer le robinet sur la position OFF et débrancher la pompe de gonflage.